

# Boîte d'embouts pour mouche bébé | Aquaromat



**Prix :**

[Voir le prix](#)

## Boîte d'embouts pour mouche bébé Aquaromat

La boîte d'embouts permet une utilisation plus économique du mouche bébé tout en limitant les déchets.

- Pratique et hygiénique
- Économique: 12 embouts stérilisables
- Prêt à l'emploi
- Embout en [silicone](#) souple et confortable
- Adaptable à la narine de bébé et réservoir anti-retour

### Utilisation du mouche bébé Aquaromat :

1. Positionnez l'embout nasal dans la narine de bébé, puis l'embout buccal dans votre bouche. Aspirez doucement.
2. Rejetez ensuite le mucus dans un mouchoir ou un coton en soufflant dans l'embout buccal.
3. Répétez l'opération pour l'autre narine.

4. Après utilisation, nettoyer l'embout nasal à l'eau chaude savonneuse puis stérilisez-le ou rincez-le avec un liquide antiseptique conseillé par votre pharmacien.